



enovis™

DONJOY®

DEFIANCE® PRO
L'orthèse personnalisée

COLORIS DEFIANCE®



Defiance® Pro
(Présenté en modèle Turquoise)



Noir
Vernis



Noir
Mat



Noir
Métallisé



Gris Foncé
Métallisé



Argent
Métallisé



Gris Clair
Mat



Blanc
Vernis



Blanc
Métallisé



Bleu Vif
Vernis



Bleu Vif Métallisé



Marine
Vernis



Marine
Métallisé



Bleu Ciel
Vernis



Turquoise
Vernis



Emeraude
Vernis



Vert Foncé
Métallisé



Or
Métallisé



Jaune Fluo
Vernis



Jaune Canari
Vernis




Orange
Vernis



Rouge
Vernis



Rouge
Métallisé

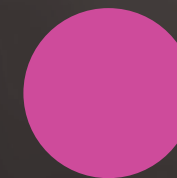

Fuchsia
Vernis



Barbe à Papa
Vernis



Bordeaux
Vernis



Violet
Vernis



Myrtille
Vernis



Olive
Mat



Dune
Mat



Bronze
Mat



PRISE DE MESURES DEFIANCE® PRO:

CCMI Mark III

Chaque Defiance® Pro est fabriquée spécifiquement selon les mesures réalisées sur le patient, expédiée dans les 15 jours ouvrés suivants. La prise de mesure est réalisée avec le dispositif CCMI Mark III qui permet de relever certaines valeurs anatomiques de référence sur le membre du patient, tels que Varus, Valgus, largeur du genou, circonférence de la cuisse et du mollet.

DEFIANCE® PRO : le choix de confiance pour les athlètes qui souhaitent bénéficier d'une liberté de mouvement



NOUVEAU DESIGN PLUS LÉGER :

Le modèle en carbone haute performance, est désormais plus léger et 5 mm plus fin que le modèle Defiance®.

La Defiance® PRO, modèle adapté à la morphologie du patient et expédié dans les 15 jours.



NOUVEAU MATÉRIAU DE GARNISSAGE :

Doux au toucher, évacue l'humidité et anti-microbien.



MOINS DE 600g :

La structure en fibre de carbone garantit la robustesse

NOUVEAUX COUSSINETS CONDYLIENS EN SILICONE

(DEFIANCE® PRO) :

Participent au confort et au maintien en position de l'orthèse.

COUSSINETS CONDYLIENS EN MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME

(OA DEFIANCE® PRO) :

S'adaptent au genou (non illustré).

BOUCLES PIVOTANTES MONTÉES À L'INTÉRIEUR :

Les boucles pivotantes permettent un ajustement personnalisé à chaque anatomie et leur montage intérieur prévient les accrochages extérieurs.

NOUVELLES EXTRÉMITÉS DE SANGLE :

Souples et solides, elles participent à la bonne application des sangles.

Nous étudions la mécanique du corps et écoutons les athlètes


Nous consultons des médecins et repoussons les limites de l'innovation technologique.

Nos orthèses combinent la technologie la plus avancée, les matériaux les plus solides, et la meilleure qualité de fabrication.

Bien entendu, toutes nos orthèses ligamentaires du genou sont conçues pour offrir un excellent soutien médio-latéral et antéro-postérieur afin de traiter les atteintes des ligaments.

DONJOY® EST LA MARQUE D'ORTHÈSES PERSONNALISÉES LA PLUS PRESCRITE DANS LE DOMAINE DU SPORT.

Protection du ligament croisé antérieur cliniquement prouvée : Système 4 Points d'Appui™

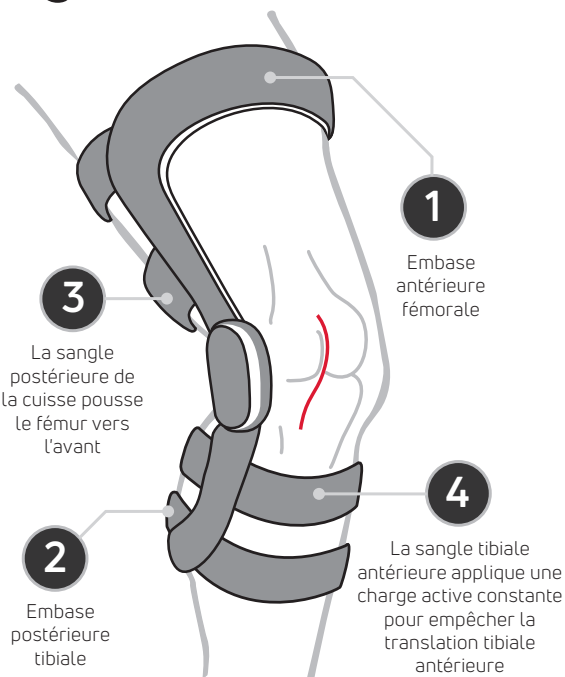

DonJoy® a été le premier sur le marché à proposer le système révolutionnaire des 4 Points, dont l'efficacité est cliniquement prouvée ^{1,3} pour :

- Aider à réduire la tension du LCA d'au moins 50 % ^{1,2,3}
- Réduire de manière significative la rotation tibiale ⁴
- Augmenter la confiance du patient après la chirurgie du LCA ⁵

En modifiant le système de sangles, notre technologie permet une mise en charge fémorale postérieure pour les lésions du LCP.

Articulation DonJoy® FourcePoint™


L'articulation FourcePoint™ diminue les forces de cisaillement antérieures et la tension sur le LCA, réduisant ainsi considérablement le risque de blessure.^{6,7,8,9}

- Aide à maintenir les deux genoux dans des positions non délétères.^{6,8,9}
- Pas de limitations significatives des performances⁶
- Améliore la cinématique des deux genoux après une chirurgie du LCA.^{6,9}



FOURCEPOINT™ LCA :

Cette conception brevetée de l'articulation permet de protéger le ligament croisé antérieur en incorporant un mécanisme d'amortissement dans les derniers 25° d'extension pour aider à maintenir le genou hors de la position à risque.

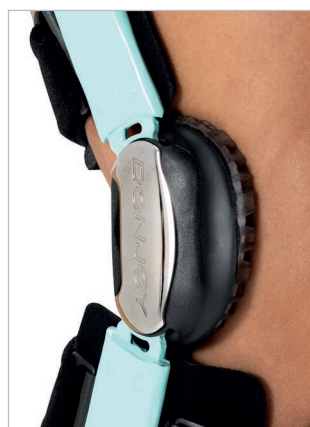

FOURCEPOINT™ PLUS :

L'articulation Plus offre les avantages de protection de l'articulation FourcePoint LCA avec une plaque extérieure en acier renforcé idéalement adaptée aux rigueurs des sports avec beaucoup d'impacts ou de collisions.



ARTICULATION RÉGLABLE OA :

Le cadre OA sur-mesure offre 1 à 7 degrés de correction. L'articulation télescopique permet d'offrir une correction supplémentaire jusqu'à 3 degrés. Les coussinets condyliens en mousse à mémoire de forme augmentent le confort et facilitent l'observance.



ARTICULATION STANDARD FINE :

L'articulation polycentrique stabilise le genou tout en s'adaptant à sa cinématique physiologique. Cette orthèse peut être utilisée pour le LCA, le LCP, ou l'instabilité combinée.

ANGLE DE FLEXION :

La force de cisaillement antéro-postérieure appliquée sur le tibia est réduite de 9 % pour les femmes et de 13 % pour les hommes.⁴

La diminution de cette force de cisaillement réduit considérablement la charge sur le LCA.^{2,4}

RÉFÉRENCES :

1. Beynnon BD, Pope MH, Wertheimer CM, Johnson RJ, Fleming BC, Nichols CE, Howe JG. Journal of Bone & Joint Surgery. Am. 1992; 74:1298-1312.
2. Beynnon BD, Johnson RJ, Fleming BC, Peura G, Renstrom PA, Nichols CE. American Journal of Sports Medicine. 1997; 25(3):353-360.
3. Fleming BC, Renstrom PA, Beynnon BD, Engstrom B, Peura G. The Influence of Functional Knee Bracing on the Anterior Cruciate Ligament Strain Biomechanics in Weightbearing and Nonweightbearing Knees. American Journal of Sports Medicine. 2000; 28 (6): 815-824.
4. Giotis D et al. Knee braces can decrease tibial rotation during pivoting that occurs in high demanding activities. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011 Aug;19(8): 1347-54.
5. Risberg MA, Beynnon BD, Peura GD, Uh BS. Proprioception after anterior cruciate ligament reconstruction with and without bracing. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 1999;7(5):303-9.
6. Lin CH, Liu H, Garrett WE, Yu B. Effects of Knee Extension Constraint Brace on Selected Lower Extremity Motion Patterns During a Stop-Jump Task. Journal of Applied Biomechanics. 2008;4:158-165.
7. Markolf KL, Gorek JF, Kabo JM, et al. Direct measurement of resultant forces in the anterior cruciate ligament. Journal of Bone & Joint Surgery. Am. 1990; 72:557-567.
8. Stanley C, Creighton R, Gross M, Garrett W, Yu B. Effects of a Knee Extension Constraint Brace on Lower Extremity Movements after ACL Reconstruction. Clinical Orthopaedics and Related Research. 2011; 469(6):1774-1780.
9. Yu B, Herman D, Preston J, Lu W, Kirkendall DT, Garrett WE. Immediate Effects of a Knee Brace with a Constraint to Knee Extension on Knee Kinematics and Ground Reaction Forces in a Stop-Jump Task. American Journal of Sports Medicine. 2004;32:1136-1143. Nunley et al. 2003
10. Nunley RM, Wright DW, Renner JB, Yu B, Garrett WE. Gender Comparison of Patella-Tendon Tibial Shift Angle with Weight-Bearing. Res Sports Med. 2003; 11:173-185.

Personnalisez davantage votre orthèse avec les accessoires et les nombreuses couleurs disponibles



KIT CONDYLE SILICONE

REF : 25-2128



KIT CONDYLE MOUSSE A MÉMOIRE DE FORME

REF : 25-2129



KIT CONDYLE AIR

REF : 25-1923-0-06000



HABILLAGE DE PROTECTION TRICOTE COMPRESSION

REF : 11-2032-x-06000



HABILLAGE DE PROTECTION EN LYCRA®

REF : 11-0075-x-00000



ATTACHEMENT ROTULIEN TRUPULL

REF : 11-1525-x



PROTECTION ANTI-CHOC

REF : 11-1006-x-06000



ANTI-PINCEMENT MOLLET

REF : 11-1367-9-06000



HABILLAGE SPORT

REF : 11-0016-x-06000 (STANDARD)

REF : 11-0103-x-06000 (COURT)

Enovis™ BeNeLux BVBA | Kleinhoefstraat 5, bus 39 |
Geel, 2440, Belgium | www.enovis.be | +32(0)14 24 80 91 |

Orders.BX@enovis.com

INFORMATION PATIENT

Nom :

Prénom :

Age :

Sexe :

Taille :

Poids :

Médecin Prescripteur :

Prise de Mesures effectuée par :

Genou :

☐ Gauche

☐ Droit

Commande :

☐ Orthèse Neuve

☐ Nouvelle prise de mesures

INFORMATION PRODUIT

Remarque : La Defiance Pro est fabriquée par défaut avec une embase de cuisse incurvée. Ce modèle n'est pas disponible pour une embase de cuisse courte.

Articulation

☐ FourcePoint™

☐ FourcePoint™ Plus

☐ Standard

☐ OA

Configuration des sangles

☐ LCA

☐ IC (instabilités combinées)

Si compartiment touché par l'arthrose (OA)

☐ Médial / Interne

☐ Latéral / Externe

Degré de correction (1 à 7°) (Standard = 3°)

COLORIS DISPONIBLES

Couleurs vernies

☐ Noir

☐ Blanc

☐ Rouge

☐ Bordeaux

☐ Orange

☐ Émeraude

☐ Turquoise

☐ Bleu Ciel

☐ Bleu Vif

☐ Marine

☐ Violet

☐ Myrtille

☐ Fuchsia

☐ Barbe à Papa

☐ Jaune Canari

☐ Jaune Fluo

Couleurs métallisées

☐ Noir

☐ Blanc

☐ Vert Foncé

☐ Gris Foncé

☐ Bleu Vif

☐ Or

☐ Argent

☐ Marine

☐ Rouge

Couleurs mates

☐ Noir

☐ Olive

☐ Dune

☐ Bronze

☐ Gris clair

Bicolores

☐ Vernis

☐ Métallisé

Couleur embase de cuisse :

Couleur embase de mollet :

Couleurs mates indisponibles

☐ Dégradé

ACCESSOIRES (en supplément)

☐ Butée de blocage à extension complète

☐ Kit Condyle Air

☐ Habillage protection en lycra

☐ Kit Condyle Gel

☐ Habillage Protection Néoprène

☐ Protection anti-chocs

☐ Manchon de compression en tricot

☐ Anti pincement mollet

☐ Habillage Sport

☐ Kit de coussinets d'atrophie

☐ Kit de coussinets condyliens en néoprène

☐ Attache Tru-Pull

☐ Kit de coussinets condyliens en mousse à mémoire de forme

☐ Kit de coussinets de sangle Sili-Grip

☐ Kit Softgood cuisse (doublures, sangles, coussinets)

☐ Kit de coussinets condyliens en silicone

☐ Kit Softgood mollet (doublures, sangles, coussinets)

☐ Kit bande anti-migration

OPTIONS :

(avec des coussinets de sangle Sili-grip installés)

☐ Embases renforcées carbone

☐ Engrenages en acier inoxydable haute résistance

☐ Blocage Extension ☐ 0° ☐ 10° ☐ 20° ☐ 30° ☐ 40° (en choisir une)

☐ Blocage Flexion ☐ 45° ☐ 60° ☐ 75° ☐ 90° (en choisir une)

☐ Kit de sangles de suspension en néoprène

☐ Bande anti-migration (installée)

Coussinet condylien

☐ Silicone (sur Defiance Pro par défaut)

☐ Mousse à mémoire de forme (sur OA Defiance Pro par défaut)

Options d'extrémité de sangle :

☐ Soft Touch (par défaut sauf pour les tailles XS - S)

☐ Légende

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation de traitement, de portabilité et d'effacement de vos données. Vous pouvez donner des instructions sur le sort des données après votre décès, de retirer, à tout moment, votre consentement à la prospection. Ces droits peuvent être exercés par courrier à l'adresse suivante :

Enovis™ - DJO France - Service Juridique - CEF - 64990 Mouguerre. En précisant votre nom, prénom, adresse postale et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d'identité. En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL ou auprès de toute autorité de contrôle compétente.

DONJOY®

enovis™

Creating Better Together™



Retrouvez-nous en ligne
www.enovis.be



ENOVIS.BE



ENOVIS BENELUX

Enovis™ - DJO Benelux BVBA
| Kleinhoefstraat 5 | bus 39 | 2440 Geel | Belgique

©ENOVIS™ - MKGBNLBV146 - REV A - 02/2026 - DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE I. LIRE ATTENTIVEMENT LES NOTICES.
FABRICANT : DJO LLC - USA.
* CRÉER MIEUX ENSEMBLE.

