

enovis™

DONJOY®

Gamme ICE
Le pouvoir du froid

Accompagner, soutenir, soulager



DONJOY®

ICE

FROID
COMPRESSION
IMMOBILISATION



Le pouvoir du froid

Chez Enovis™, nous sommes convaincus que l'efficacité naît de l'**harmonie** entre **innovation technologique** et **soin personnalisé**. Entre le **froid thérapeutique**, la **compression ciblée** et l'**immobilisation intelligente**.

Notre force ? Une gamme de **dispositifs complémentaires**, à **utiliser en alternance** ou de manière **combinée**, pour une **récupération optimale** :

● L'ATTELLE

Portée en continu, elle stabilise, immobilise ou corrige selon les besoins thérapeutiques.

❄️ LE KIT DE CRYOTHÉRAPIE ICE

Utilisé à intervalles réguliers (protocole G.R.E.C. → Glace - Repos - Elévation - Compression), il apaise la douleur, limite l'inflammation et accélère le retour à la mobilité.

Avec la **gamme ICE**, nous repensons le **soin orthopédique post-opératoire** selon une **approche globale**, conçue pour transformer la cryothérapie en une synergie puissante alliant :

RÉCUPÉRATION

PERFORMANCE

MOBILITÉ RETROUVÉE

Des protocoles adaptés à chaque patient

Une efficacité ressentie dès les premiers instants



GAMME ICE



La cryothérapie : déclencheur de *récupération, performance et liberté de mouvement* !

SOMMAIRE

PIED	7
PodHalten Ice	9
PodHalten Ice +	10
Podalux™ II Ice	12
Podapro™ Ice	13
Podalib® Ice	15
CHEVILLE	17
FusioLight™ II Ice	18
Maxtrax® Xcel Ice	19
GENOU	21
Knee Universal Ice	22
Knee Universal Excell Ice	22
Perform'Ice	23
Support Everest II Ice	24
Support Everest II Excell Ice	24
Immo AT4 3V Ice	25
HANCHE	27
IceStrap™	28
POIGNET	29
RespiForm™ Ice	30
ÉPAULE/COUDE	31
Shoulder Ice	32
Elbow Ice	33

LES KITS DE FROID	34
Kit Excell Ice_Avant-Pied	
Ice Pad Walker	
Kit Ice_Cheville	
Kit Ice_Genou_Antéro-Postérieur	
Kit Excell Ice_Genou_Antéro-Postérieur	
Kit Ice_Poignet	
Kit Ice_Coude	

GAMME



PÉDIATRIQUE



GRANDE TAILLE



CRYOTHÉRAPIE

PRISES DE MESURE

POINTURE



Prendre la pointure du patient.

CIRCONFÉRENCE CHEVILLE



Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

TAILLE DU PATIENT



Mesurer la hauteur du patient.

CIRCONFÉRENCE POITRINE



Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine (sans les bras).

TOUR DE HANCHE



Mesurer la circonférence des hanches 2,5 cm en-dessous des crêtes iliaques.

CIRCONFÉRENCE POIGNET



Mesurer la circonférence 5 cm en-dessous du pli de flexion du poignet.

CIRCONFÉRENCE CUISSE



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

LONGUEUR DE LA JAMBRE



Mesurer la longueur interne de la jambe, du pli crural à la malléole et retirer 20 cm.



PIED







DONJOY® PODHALTEN ICE

Solution post-opératoire



PODHALTEN
Chaussure thérapeutique



KIT EXCELL ICE_AVANT-PIED
Froid & Compression (p.34)



PODALIB®
Releveur de pied



HP2
Housse de protection

INDICATIONS

Le traitement par cryothérapie contribue à fournir des effets antalgiques, hémostatiques et à réduire l'œdème

- Suites opératoires d'une chirurgie de l'avant-pied
- Hallux Valgus
- Fractures de l'avant-pied

CARACTÉRISTIQUES

PODHALTEN

- Chaussure thérapeutique à usage temporaire (CHUT) de décharge de l'avant-pied
- Grand volume avec un système de fermeture par lacets permettant de s'adapter à toutes formes et tailles de pansements post-opératoires
- Semelle bateau afin de générer une décharge partielle de l'avant-pied
- Disponible en 14 tailles (du 35 au 48)

KIT EXCELL ICE_AVANT-PIED

- Cryothérapie & Compression : 2 packs de froid pour une application localisée de cryothérapie compressive
- Le gel du pack de froid reste modelable pour s'adapter au membre atteint
- Livré avec une pompe manuelle, un textile de protection et un sac de congélation
- Modèle bilatéral
- Taille unique

PODALIB®

- Design léger et discret favorisant une démarche naturelle
- Peut être porté avec tous type de chaussures ou pied nu
- Modèle bilatéral

HOUSSE DE PROTECTION

- Housse de protection pour pansements ou plaies
- Facilite la toilette (bain ou douche)

POUR UNE RÉCUPÉRATION OPTIMALE, CES PRODUITS SONT COMPLÉMENTAIRES ET SE PORTENT SÉPARÉMENT

POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
35	82-1160-35	0190446920625
36	82-1160-36	0190446920632
37	82-1160-37	0190446920649
38	82-1160-38	0190446920670
39	82-1160-39	0190446920687
40	82-1160-40	0190446920694
41	82-1160-41	0190446920700
42	82-1160-42	0190446920717
43	82-1160-43	0190446920724
44	82-1160-44	0190446920731
45	82-1160-45	0190446920748
46	82-1160-46	0190446920755
47	82-1160-47	0190446920762
48	82-1160-48	0190446920779



DONJOY® PODHALTEN ICE +

Solution post-opératoire complète



PODHALTEN
Chaussure thérapeutique



KIT EXCELL ICE_AVANT-PIED
Froid & Compression (p.34)



PODALIB®
Releveur de pied



ACTYTOE™
Protection Hallux Valgus



HP2
Housse de protection



SONOV
Socquette de contention

INDICATIONS

Le traitement par cryothérapie contribue à fournir des effets antalgiques, hémostatiques et à réduire l'œdème

- Suites opératoires d'une chirurgie de l'avant-pied
- Hallux Valgus
- Fractures de l'avant-pied

CARACTÉRISTIQUES

PODHALTEN

- Chaussure thérapeutique à usage temporaire (CHUT) de décharge de l'avant-pied
- Grand volume avec un système de fermeture par lacets permettant de s'adapter à toutes formes et tailles de pansements post-opératoires
- Semelle bateau afin de générer une décharge partielle de l'avant-pied
- Disponible en 14 tailles (du 35 au 48)

KIT EXCELL ICE_AVANT-PIED

- Cryothérapie & Compression : 2 packs de froid pour une application localisée de cryothérapie compressive
- Le gel du pack de froid reste modelable pour s'adapter au membre atteint
- Livré avec une pompe manuelle, un textile de protection et un sac de congélation
- Modèle bilatéral
- Taille unique

PODALIB

- Design léger et discret favorisant une démarche naturelle
- Peut être porté avec tous types de chaussures ou pied nu
- Modèle bilatéral

ACTYTOE™

- Attelle anatomiquement profilée pour une utilisation pré ou post-opératoire
- Coussin en mousse à mémoire de forme et sangles réglables pour soutenir l'arche transversale et stabiliser le médio-pied
- Attelle articulée verrouillable pour port diurne et nocturne

SOCQUETTE SONOV

- Contention au niveau de l'avant-pied et du médio-pied (à porter après le retrait des pansements)
- Cupule antérieure découpable
- Cheville non compressive pour enfilage facilité

HOUSSE DE PROTECTION

- Housse de protection pour pansements ou plaies
- Facilite la toilette (bain ou douche)

POUR UNE RÉCUPÉRATION OPTIMALE,
CES PRODUITS SONT COMPLÉMENTAIRES
ET SE PORTENT SÉPARÉMENT



POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
35	82-2160-35	0190446920786
36	82-2160-36	0190446920793
37	82-2160-37	0190446920809
38	82-2160-38	0190446920816
39	82-2160-39	0190446920823
40	82-2160-40	0190446920830
41	82-2160-41	0190446920854
42	82-2160-42	0190446920861
43	82-2160-43	0190446920878
44	82-2160-44	0190446920885
45	82-2160-45	0190446920892
46	82-2160-46	0190446920908
47	82-2160-47	0190446920915
48	82-2160-48	0190446920922



DONJOY® PODALUX™ II ICE

Solution post-opératoire avec décharge partielle de l'avant-pied



PODALUX™ II
Chaussure post-opératoire



KIT EXCELL ICE_AVANT-PIED
Froid & Compression (p.34)



PODALIB®
Releveur de pied



HP2
Housse de protection

INDICATIONS

Le traitement par cryothérapie contribue à fournir des effets antalgiques, hémostatiques et à réduire l'œdème

- Suites opératoires d'une chirurgie de l'avant-pied
- Hallux Valgus
- Phase post-opératoire du syndrome de Morton
- Fractures de l'avant-pied

CARACTÉRISTIQUES

PODALUX™ II

- Semelle à rigidité modulable (2 niveaux distincts) : le cambriion amovible permet de moduler la rigidité de la semelle, pour s'adapter aux différentes phases de rééducation et favoriser la reprise d'une démarche naturelle
- Gestion aisée d'un pansement volumineux
- Chaussure large, ouverte, adaptable au volume du pied et pouvant accommoder tous types de pansements
- Modèle bilatéral
- Disponible en 6 tailles (de S à XXXL)

KIT EXCELL ICE_AVANT-PIED

- Cryothérapie & Compression : 2 packs de froid pour une application localisée de cryothérapie compressive
- Le gel du pack de froid reste modelable pour s'adapter au membre atteint
- Livré avec une pompe manuelle, un textile de protection et un sac de congélation
- Modèle bilatéral
- Taille unique

PODALIB®

- Design léger et discret favorisant une démarche naturelle
- Peut être porté avec tous types de chaussures ou pied nu
- Modèle bilatéral

HOUSSE DE PROTECTION

- Housse de protection pour pansements ou plaies
- Facilite la toilette (bain ou douche)

POUR UNE RÉCUPÉRATION OPTIMALE, CES PRODUITS SONT COMPLÉMENTAIRES ET SE PORTENT SÉPARÉMENT

POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
35-36	82-1042-1	0190446920939
37-38	82-1042-2	0190446920946
39-40	82-1042-3	0190446920953
41-42	82-1042-4	0190446920960
43-45	82-1042-5	0190446920977
46-48	82-1042-6	0190446920984

Podalux™ II Ice DonJoy®



DONJOY® PODAPRO™ ICE

Solution post-opératoire avec décharge de l'avant-pied



PODAPRO™
Chaussure post-opératoire



KIT EXCELL ICE_AVANT-PIED
Froid & Compression (p.34)



PODALIB®
Releveur de pied



HP2
Housse de protection

INDICATIONS

Le traitement par cryothérapie contribue à fournir des effets antalgiques, hémostatiques et à réduire l'œdème

- Suites opératoires d'une chirurgie de l'avant-pied
- Hallux Valgus
- Phase post-opératoire du syndrome de Morton
- Fractures de l'avant-pied

CARACTÉRISTIQUES

PODAPRO™

- Le design de la semelle permet de réduire la pression à l'avant du pied et de maintenir le poids en arrière des articulations métatarso-phalangiennes
- Semelle à bout carré et antidérapante
- Stabilité accrue grâce à la large surface de la semelle en contact avec le sol
- Gestion aisée d'un pansement volumineux
- Modèle bilatéral
- Disponible en 6 tailles (de XXS à XL)

KIT EXCELL ICE_AVANT-PIED

- Cryothérapie & Compression : 2 packs de froid pour une application localisée de cryothérapie compressive
- Le gel du pack de froid reste modelable pour s'adapter au membre atteint
- Livré avec une pompe manuelle, un textile de protection et un sac de congélation
- Modèle bilatéral
- Taille unique

PODALIB®

- Design léger et discret favorisant une démarche naturelle
- Peut être porté avec tous types de chaussures ou pied nu
- Modèle bilatéral

HOUSSE DE PROTECTION

- Housse de protection pour pansements ou plaies
- Facilite la toilette (bain ou douche)

POUR UNE RÉCUPÉRATION OPTIMALE, CES PRODUITS SONT COMPLÉMENTAIRES ET SE PORTENT SÉPARÉMENT

POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
<35	82-1247-0	0190446920991
35-37	82-1247-1	0190446921004
37-39	82-1247-2	0190446921011
39-42	82-1247-3	0190446921028
42-44	82-1247-4	0190446921035
>44	82-1247-5	0190446921042

LE KIT DE FROID POUR L'AVANT-PIED PEUT ÊTRE UTILISÉ DE PLUSIEURS FAÇONS.

VOIR LA VIDÉO



Mise en place du kit au niveau de l'avant-pied



Mise en place du kit au niveau du mollet





DONJOY® PODALIB® ICE

Releveur de pied avec kit de froid et compression



PODALIB®
Releveur de pied



KIT EXCELL ICE_AVANT-PIED
Froid & Compression (p.34)



INDICATIONS

Le traitement par cryothérapie contribue à fournir des effets antalgiques, hémostatiques et à réduire l'œdème

- Hypertonie spastique des fléchisseurs plantaires
- Déficience ou paralysie des muscles releveurs de pied, dues à des lésions neurologiques

CARACTÉRISTIQUES

PODALIB®

- Releveur de pied dynamique
- Design léger et discret favorisant une démarche naturelle
- Peut être porté avec tous types de chaussures ou pied nu
- Modèle bilatéral
- Disponible en 4 tailles (de XS à L)

KIT EXCELL ICE_AVANT-PIED

- Cryothérapie & Compression : 2 packs de froid pour une application localisée de cryothérapie compressive
- Le gel du pack de froid reste modelable pour s'adapter au membre atteint
- Livré avec une pompe manuelle, un textile de protection et un sac de congélation
- Modèle bilatéral
- Taille unique

POUR UNE RÉCUPÉRATION OPTIMALE, CES PRODUITS SONT COMPLÉMENTAIRES ET SE PORTENT SÉPARÉMENT

TAILLE	CIRCONFÉRENCE CHEVILLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
XS	13 - 19 cm	82-1013-1	0190446922346
S	13 - 20 cm	82-1013-2	0190446919964
M	20 - 27 cm	82-1013-3	0190446919971
L	27 - 34 cm	82-1013-4	0190446919988

Prescrire : **PodaLib® Ice**



CHEVILLE





DONJOY® FUSIOLIGHT™ II ICE

VOIR LA VIDÉO



Attelle et kit de froid /compression



FUSIOLIGHT™ II
Attelle de cheville



KIT ICE_CHEVILLE
Froid & Compression (p.34)

INDICATIONS

Le traitement par cryothérapie contribue à fournir des effets antalgiques, hémostatiques et à réduire l'œdème

- Phase aiguë de l'entorse de gravité légère (stade I) à modérée (stade II)
- Soins post-opératoires après une chirurgie de la cheville
- Traumatologie du sport

CARACTÉRISTIQUES

FUSIOLIGHT™ II

- Les inserts en mousse à mémoire de forme réduisent la pression sur les zones douloureuses
- Les coques semi-rigides minimisent la rotation de la cheville
- Modèle bilatéral
- Disponible en 3 tailles (S, M, L)

KIT ICE_CHEVILLE

- Cryothérapie & Compression : 1 pack de froid pour une application localisée de cryothérapie compressive
- Le gel du pack de froid reste modelable pour s'adapter au membre atteint
- Livré avec une pompe manuelle, un textile de protection et un sac de congélation
- Modèle bilatéral
- Taille unique

POUR UNE RÉCUPÉRATION OPTIMALE, CES PRODUITS SONT COMPLÉMENTAIRES ET SE PORTENT SÉPARÉMENT

TAILLE	HAUTEUR PATIENT	CODE ARTICLE	CODE GTIN
S	<1,5 m	82-1052-1	0190446921103
M	1,5-1,65 m	82-1052-2	0190446921110
L	>1,65 m	82-1052-3	0190446921127

Prescrire : **DonJoy FusioLight™ II Ice**



DONJOY® MAXTRAX® XCEL ICE

VOIR LA VIDÉO



Botte d'immobilisation, pack de froid et protection



Fabricant : Span Link International LLC

MAXTRAX® XCEL LONGUE
Botte d'immobilisation



ICE PAD WALKER
Pack de froid (p.34)



HP2
Housse de protection

INDICATIONS

Le traitement par cryothérapie contribue à fournir des effets antalgiques, hémostatiques et à réduire l'œdème

- Entorse grave de la cheville – Stade III (arrachement ligamentaire)
- Fracture uni ou bimalléolaire

CARACTÉRISTIQUES

MAXTRAX® XCEL LONGUE

- Structure légère et profilée, de forme anatomique
- La semelle externe absorbe les chocs et réduit l'impact du talon au sol
- Le design innovant de la semelle favorise une démarche stable et naturelle
- Le pack de pied est détachable et peut être lavé à la main
- Modèle bilatéral
- Disponible en 5 tailles (XS à XL)

ICE PAD WALKER

- Pack de froid pour le pied pour une application localisée de cryothérapie
- Le gel du pack de froid reste modelable pour s'adapter au membre atteint
- Livré avec un textile de protection et un sac de congélation
- Modèle bilatéral
- Taille unique

HOUSSE DE PROTECTION

- Housse de protection pour pansements ou plaies
- Facilite la toilette (bain ou douche)



TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
XS	<36	82-1094-XS	0190446921059
S	36-39	82-1094-S	0190446921066
M	40-43	82-1094-M	0190446921073
L	44-46	82-1094-L	0190446921080
XL	>46	82-1094-XL	0190446921097

Prescrire : **MaxTrax® XCEL Ice DonJoy®**



KNEE UNIVERSAL ICE

GENOU



**DONJOY®**

KNEE UNIVERSAL ICE / KNEE UNIVERSAL EXCELL ICE

Cryothérapie compressive antéro-postérieure

VOIR LA VIDÉO



KNEE UNIVERSAL ICE

(1 Pack de froid antérieur + 1 pack de froid postérieur)



KNEE UNIVERSAL EXCELL ICE

(2 Packs de froid antérieurs + 2 packs de froid postérieurs)

INDICATIONS

Le traitement par cryothérapie contribue à fournir des effets antalgiques, hémostatiques et à réduire l'œdème.

- Intervention chirurgicale type prothèse totale ou partielle de genou
- Usage pré ou post-opératoire, post-traumatique, idéal pour les indications ne nécessitant pas d'immobilisation
- Traitement par cryothérapie et compression (Protocole GREC)

CARACTÉRISTIQUES

- Cryothérapie & Compression : **1 pack de froid antérieur + 1 pack de froid postérieur** pour une application localisée de cryothérapie compressive recouvrant toute la circonférence du genou
- Le gel du pack de froid reste modelable pour s'adapter au membre atteint
- Livré avec une pompe manuelle, un textile de protection et un sac de congélation
- 2 articulations polycentriques en aluminium
- Les montants latéraux amovibles permettent un maintien supplémentaire et peuvent être retirés en phase de rééducation pour accompagner le mouvement naturel de l'articulation lors de l'ambulation
- Modèle bilatéral
- Disponible en 2 tailles (Standard et XL), adaptables à toutes les morphologies



VERSION EXCELL ICE

Cryothérapie & Compression : **2 packs de froid antérieurs + 2 packs de froid postérieurs** pour une application localisée de cryothérapie compressive recouvrant toute la circonférence du genou

x2



x2



KNEE UNIVERSAL ICE (1 PACK DE FROID ANTÉRIEUR + 1 PACK DE FROID POSTÉRIEUR)

TAILLE	CIRCONFÉRENCE CUISSE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
STANDARD	41-65 cm	82-0166	3770035638017
XL	>65 cm	82-0166-XL	3770035638093

KNEE UNIVERSAL EXCELL ICE (2 PACKS DE FROID ANTÉRIEURS + 2 PACKS DE FROID POSTÉRIEURS)

TAILLE	CIRCONFÉRENCE CUISSE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
STANDARD	41-65 cm	82-0167	3770035638031
XL	>65 cm	82-0167-XL	3770035638109

Prescrire : *Knee Universal Ice DonJoy®* et *Knee Universal Excell Ice DonJoy®*



DONJOY® PERFORM' ICE

Froid et compression



INDICATIONS

Le traitement par cryothérapie contribue à fournir des effets antalgiques, hémostatiques et à réduire l'œdème.

- Intervention chirurgicale type prothèse totale ou partielle de genou
- Usage pré ou post-opératoire, post-traumatique, idéal pour les indications ne nécessitant pas d'immobilisation
- Traitement par cryothérapie et compression (Protocole G.R.E.C.)

CARACTÉRISTIQUES

- Cryothérapie & Compression : **2 Packs de froid antérieurs** sont fournis pour une application localisée de cryothérapie en continu, ainsi qu'une housse gonflable avec pompe manuelle pour ajouter un effet compressif
- Le Gel du pack de froid reste modelable pour s'adapter au membre atteint
- Articulations polycentriques en aluminium, conformables aux besoins du patient
- Les montants latéraux amovibles permettent un maintien supplémentaire et peuvent être retirés en phase de rééducation pour accompagner le mouvement naturel de l'articulation lors de l'ambulation
- 2 sangles indépendantes permettent de régler le niveau de compression et de maintien
- Les sangles de maintien peuvent être rallongées par des bandes adhésives supplémentaires (taille XL)
- Livré avec un Jersey de protection
- Modèle bilatéral
- Disponible en 2 tailles (Standard et XL), adaptables à toutes les morphologies

TAILLE	CIRCONFÉRENCE CUISSE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
STANDARD	33-60 cm	82-0015	0190446274520
XL	61-81 cm	82-0020	0190446266013

Prescrire : **Perform'Ice Genou DonJoy®**



LIVRÉ AVEC 2 PACKS DE FROID ANTÉRIEURS

**DONJOY®**

SUPPORT EVEREST II ICE

SUPPORT EVEREST II EXCELL ICE

Attelle 3 en 1 (immobilisation, cryothérapie compressive et reprise d'activité)



SUPPORT EVEREST II
Attelle de genou post-opératoire articulée



KIT ICE_GENOU
Cryothérapie compressive antéro-postérieure (p.34)

INDICATIONS

Le traitement par cryothérapie contribue à fournir des effets antalgiques, hémostatiques et à réduire l'œdème.

- Usage post-opératoire de chirurgie du genou nécessitant immobilisation et glaçage : ligamentoplastie, recentrage rotulien, ostéosynthèse, ostéotomie et suture méniscale
- Entorses modérées à graves des ligaments latéraux (LLI, LLE) et/ou du pivot central (LCA, LCP), lésions méniscales, réhabilitation et reprise d'activité

CARACTÉRISTIQUES

SUPPORT EVEREST II

- Plots de blocages simples à positionner (sans outil)
- Limitation de l'amplitude de mouvement en flexion/extension ou de blocage à 0°, 10°, 20°, 30°, 60°, 90° et Full range (amplitude complète)
- Tissu ajouré compressif et hautement respirant
- Panneau poplité en Lycra doux, pour un excellent confort
- Système anti-glisse : évite l'effet garrot tout en maintenant l'orthèse en place
- 4 sangles indépendantes pour régler le niveau de compression et de maintien
- Hauteur de l'attelle : XS/S/M : 39,5 cm - L/XL/XXL : 44,5 cm
- Livré avec un textile de protection et un sac de congélation
- Modèle bilatéral
- Disponible en 6 tailles (de Pédiatrique-XS à XXL)

KIT ICE_GENOU

- Cryothérapie & Compression : **1 pack de froid antérieur + 1 pack de froid postérieur** pour une application localisée de cryothérapie compressive recouvrant toute la circonférence du genou
- Le gel du pack de froid reste modelable pour s'adapter au membre atteint
- Livré avec une pompe manuelle, textile de protection et sac de congélation
- Modèle bilatéral
- Taille unique



VERSION EXCELL ICE

Cryothérapie & Compression : **2 packs de froid antérieurs + 2 packs de froid postérieurs** pour une application localisée de cryothérapie compressive

x2



x2



SUPPORT EVEREST II ICE

(1 PACK DE FROID ANTERIEUR + 1 PACK DE FROID POSTERIEUR)

TAILLE	CIRC. CUISSE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
XS	33-37 cm	82-1046-1	0190446921332
S	38-43 cm	82-1046-2	0190446921349
M	44-49 cm	82-1046-3	0190446921356
L	50-55 cm	82-1046-4	0190446921363
XL	56-60 cm	82-1046-5	0190446921370
XXL	61-64 cm	82-1046-6	0190446921387

SUPPORT EVEREST II EXCELL ICE

(2 PACKS DE FROID ANTERIEURS + 2 PACKS DE FROID POSTERIEURS)

TAILLE	CIRC. CUISSE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
XS	33-37 cm	82-2046-1	0190446921394
S	38-43 cm	82-2046-2	0190446921417
M	44-49 cm	82-2046-3	0190446921400
L	50-55 cm	82-2046-4	0190446921424
XL	56-60 cm	82-2046-5	0190446921431
XXL	61-64 cm	82-2046-6	0190446921448

Prescrire : **Support Everest II Ice DonJoy®** et **Support Everest II Excell Ice DonJoy®**



DONJOY®

IMMO AT4 3V ICE

Attelle 2 en 1 (immobilisation stricte et cryothérapie compressive)



IMMO AT4 3V
Attelle de genou post-opératoire



INDICATIONS

Le traitement par cryothérapie contribue à fournir des effets antalgiques, hémostatiques et à réduire l'œdème.

- Immobilisation totale du genou en pré ou post-opératoire : lésions ligamentaires, rotuliennes, méniscales, chirurgie du genou
- Immobilisation d'urgence ou d'attente sur diagnostic retardé

CARACTÉRISTIQUES

IMMO AT4 3V

- Attelle de genou en maille grattée perforée (matière ultra-respirante, perméable et aérée) et système anti-glisse
- Ajustement aisé grâce au système de sangles auto-agrippantes
- Bandes de serrage réglables
- Fermeture pratique par clips avec boucles extra plates, peu encombrantes et esthétiques, permettant une seule mise en place initiale et un accès facilité pour effectuer les soins
- Baleines en aluminium bilatérales, malléables et amovibles, pour s'ajuster aux besoins du patient (limitation varus/valgus)
- Baleine postérieure pour une immobilisation stricte 0°
- Livré avec un textile de protection et un sac de congélation
- Modèle bilatéral
- Structure légère (≤ 600 g)
- Disponible en 4 tailles (de S à XL) selon 4 hauteurs : 40, 50, 60 et 65 cm

KIT ICE_GENOU

- Cryothérapie & Compression : **1 pack de froid antérieur + 1 pack de froid postérieur** pour une application localisée de cryothérapie compressive recouvrant toute la circonférence du genou
- Le gel du pack de froid reste modelable pour s'adapter au membre atteint
- Livré avec une pompe manuelle, textile de protection et sac de congélation
- Modèle bilatéral
- Taille unique



KIT ICE_GENOU
Cryothérapie compressive antéro-postérieure (p.34)

TAILLE	HAUTEUR ATTELLE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
S	40 cm	82-1043-01	0190446918929
M	50 cm	82-1043-02	0190446919995
L	60 cm	82-1043-03	0190446920007
XL	65 cm	82-1043-04	0190446920014

Prescrire : Immo AT4 3V Ice DonJoy®





HANCHE



DONJOY® ICESTRAP™

VOIR LA VIDÉO



Application de froid ciblée pour les soins post-opératoires



INDICATIONS

Le traitement par cryothérapie contribue à fournir des effets antalgiques, hémostatiques et à réduire l'œdème.

- Soins post-opératoires (arthroscopie, arthroplastie de hanche ou chirurgie abdominale)

CARACTÉRISTIQUES

- Ceinture de soutien abdominal facilement ajustable
- Baleines flexibles amovibles
- Pack de froid amovible et réutilisable, qui peut être fixé avec une housse protectrice pour la peau, offrant ainsi une thérapie par le froid en toute sécurité. Le produit comprend 2 packs de froid
- Sac à fermeture zippée, qui protège le pack de froid lorsqu'il est placé au congélateur
- Sangle de cuisse pour maintenir la position du pack de froid sur la hanche. Une rallonge peut être utilisée si nécessaire
- Hauteur ceinture : 25 cm
- Usage bilatéral pour la hanche



TAILLE	CIRCONFÉRENCE HANCHE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
S	64-82 cm	82-0085-2	0190446827023
M	82-96 cm	82-0085-3	0190446827030
L	96-114 cm	82-0085-4	0190446827047
XL	114-132 cm	82-0085-5	0190446827054
XXL	132-152 cm	82-0085-6	0190446877066

Prescrire : **DonJoy® Icestrap™**

POIGNET



DONJOY® RESPIFORM™ ICE

VOIR LA VIDÉO



Attelle & Kit de Froid / Compression



Fabricant : Antonio Morón de Blas, S.L.

RESPIFORM™
Attelle de poignet



KIT ICE_POIGNET
Froid & Compression (p.34)



INDICATIONS

Combine les effets de la cryothérapie localisée et de l'immobilisation du poignet . Le traitement par cryothérapie contribue à fournir des effets antalgiques, hémostatiques et à réduire l'œdème.

- Syndrome du canal carpien
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire
- Entorses et tendinopathies du poignet
- Arthrite du poignet

CARACTÉRISTIQUES

DONJOY RESPIFORM™

- Attelle de poignet pour immobilisation
- Design anatomique ajusté
- Modèle latéralisé
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL)

KIT ICE_POIGNET

- Cryothérapie & Compression : 1 pack de froid pour une application localisée de cryothérapie compressive
- Le gel du pack de froid reste modelable pour s'adapter au membre atteint
- Livré avec une pompe manuelle, un textile de protection et un sac de congélation
- Modèle bilatéral
- Taille unique

TAILLE	CIRCONFÉRENCE POIGNET	CODE ARTICLE	CODE GTIN
XS - DROITE	11-14 cm	82-16160	0190446921233
S - DROITE	14-16 cm	82-16162	0190446921240
M - DROITE	16-19 cm	82-16163	0190446921257
L - DROITE	19-21 cm	82-16164	0190446921264
XL - DROITE	21-24 cm	82-16165	0190446921271
XS - GAUCHE	11-14 cm	82-16150	0190446921288
S - GAUCHE	14-16 cm	82-16152	0190446921295
M - GAUCHE	16-19 cm	82-16153	0190446921301
L - GAUCHE	19-21 cm	82-16154	0190446921318
XL - GAUCHE	21-24 cm	82-16155	0190446921325

Prescrire : **DonJoy Respiform™ Ice™**

POUR UNE RÉCUPÉRATION OPTIMALE, CES PRODUITS SONT
COMPLÉMENTAIRES ET SE PORTENT SÉPARÉMENT

ÉPAULE_COUDE

SHOULDER ICE

DONJOY® SHOULDER ICE

Cryothérapie de l'épaule post-opératoire



VOIR LA VIDÉO



INDICATIONS

Le traitement par cryothérapie contribue à fournir des effets antalgiques, hémostatiques et à réduire l'œdème.

- Soins post-opératoires après une chirurgie de l'épaule (prothèse, réparation de la coiffe des rotateurs)
- Traumatisme de l'épaule
- Compatible avec attelle d'épaule pour immobilisation en abduction (type Ultrasling)

CARACTÉRISTIQUES

- Gilet d'épaule de cryothérapie apportant soutien et froid à l'épaule
- Le gel du pack de froid reste modelable pour s'adapter au membre atteint
- 2 sangles indépendantes permettent de régler le niveau de maintien
- Livré avec un textile de protection, un sac de congélation et une sangle d'immobilisation
- Modèle bilatéral
- Disponible en 2 tailles (Standard et XL)



TAILLE	TOUR DE POITRINE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
STANDARD	<120 cm	82-0163-1	3770035638086
XL	>120 cm	82-0163-2	3770035638079

Prescrire : **Shoulder Ice DonJoy®**



DONJOY® ELBOW ICE

Attelle & Kit de Froid / Compression

VOIR LA
VIDÉO

RESPIFORM™ + KIT ICE_COUDE
Attelle de poignet associée au froid & à la compression

INDICATIONS

Combine les effets de la cryothérapie localisée au niveau du coude et de l'immobilisation du poignet afin d'éviter la sollicitation des fléchisseurs/ extenseurs du poignet et des doigts en cas d'épicondylalgie latérale ou médiale (Tennis Elbow/Golf Elbow).

- Tendinopathie du coude (Épicondylalgie)
- Entorse et traumatisme du coude
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire

CARACTÉRISTIQUES

RESPIFORM™

- Attelle de poignet pour immobilisation
- Design anatomique ajusté
- Modèle latéralisé
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL)

KIT ICE_COUDE















- Cryothérapie & Compression : 1 pack de froid pour une application localisée de cryothérapie compressive
- Le gel du pack de froid reste modelable pour s'adapter au membre atteint
- Livré avec une pompe manuelle, un textile de protection et un sac de congélation
- Taille unique



TAILLE	CIRCONFÉRENCE POIGNET	CODE ARTICLE	CODE GTIN
XS - DROITE	11-14 cm	82-26160	0190446921134
S - DROITE	14-16 cm	82-26162	0190446921141
M - DROITE	16-19 cm	82-26163	0190446921158
L - DROITE	19-21 cm	82-26164	0190446921165
XL - DROITE	21-24 cm	82-26165	0190446921172
XS - GAUCHE	11-14 cm	82-26150	0190446921189
S - GAUCHE	14-16 cm	82-26152	0190446921196
M - GAUCHE	16-19 cm	82-26153	0190446921202
L - GAUCHE	19-21 cm	82-26154	0190446921219
XL - GAUCHE	21-24 cm	82-26155	0190446921226

Prescrire : **Elbow Ice DonJoy®**

DÉTAILS DES KITS DE FROID

DÉSIGNATION	MISE EN PLACE	COMPOSITION	CODE ART.	CODE GTIN
KIT EXCELL ICE_AVANT-PIED  x 2		2 PACKS DE FROID AVANT-PIED 1 POMPE MANUELLE 1 LYCRA 1 SACHET CONGÉLATION	82-0168	3770035638055
ICE PAD WALKER 		1 PACK DE FROID PIED 1 LYCRA 1 SACHET CONGÉLATION	82-0162	3760329600127
KIT ICE_CHEVILLE 		1 PACK DE FROID CHEVILLE 1 POMPE MANUELLE 1 LYCRA 1 SACHET CONGÉLATION	82-0169	3770011902156
KIT ICE_GENOU_ANTÉRO-POSTÉRIEUR 		1 PACK DE FROID GENOU ANTÉRIEUR 1 PACK DE FROID GENOU POSTÉRIEUR 1 POMPE MANUELLE 1 LYCRA 1 SACHET CONGÉLATION	82-0164	3770011902149
KIT EXCELL ICE_GENOU_ANTÉRO-POSTÉRIEUR  x 2 x 2		2 PACKS DE FROID GENOU ANTÉRIEURS 2 PACKS DE FROID GENOU POSTÉRIEURS 1 POMPE MANUELLE 1 LYCRA 1 SACHET CONGÉLATION	82-0165	3770035638048
KIT ICE_POIGNET 		1 PACK DE FROID POIGNET 1 POMPE MANUELLE 1 LYCRA 1 SACHET CONGÉLATION	82-0171	3770035638062
KIT ICE_COUDE 		1 PACK DE FROID COUDE 1 POMPE MANUELLE 1 LYCRA 1 SACHET CONGÉLATION	82-0170	3770011902279



DONJOY®

GAMME ICE



FROID
COMPRESSION
IMMOBILISATION



DONJOY®

enovis™

Creating Better Together™



RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE

BLOG | CATALOGUE PRODUITS | ENOVIS SELECT | FACTURES | VOS CONTACTS

DJO FRANCE SAS - CENTRE EUROPÉEN DE FRÊT, 3 RUE DE BETHAR, 64990 MOUGUERRE

Dispositifs médicaux de Classe I destinés, pour chaque produit, aux traitements des différentes pathologies décrites dans ce document.

Ces dispositifs médicaux portent, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les notices. Fabricant : DJO LLC - USA (sauf mentions spécifiques).

*Créer Mieux Ensemble

