

Instrucciones de uso para el paciente

ANTES DE UTILIZAR LA ORTESIS, LEA ATENTAMENTE Y EN SU TOTALIDAD LAS INSTRUCCIONES DE USO. LA APLICACIÓN CORRECTA ES FUNDAMENTAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ORTESIS

INSTRUCCIONES DE USO

El soporte de hombro DonJoy PSI Plus está diseñado para ofrecer apoyo al hombro después de una lesión o cirugía. Está disponible en solo dos tallas y puede utilizarse tanto en el hombro derecho como en el izquierdo. Si lo usa después de una cirugía, es posible que se lo coloquen mientras aún está en el quirófano. Esta guía le muestra cómo ponérselo usted mismo más adelante, cuando ya esté listo.


Antes de comenzar

Antes de colocar el soporte por primera vez:

- Retire la cincha del brazo superior y la de la mano del cinturón.
- Asegúrese de que la parte con velcro del cinturón siempre se cierre hacia su hombro lesionado; esto ayuda a mantener el hombro en una posición segura.



En el hospital (después de la cirugía)

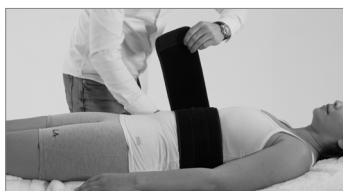

1. Deslizarán el cinturón por debajo de su espalda, con el cierre orientado hacia su hombro lesionado, y lo cerrarán por delante.



2. La cincha del brazo superior se sujeta luego en el lateral del cinturón.
 · A veces, esta cincha se coloca un poco más arriba para mantener libre el pliegue del codo




3. Su antebrazo descansará dentro del bolsillo para la mano, el cual se coloca en el centro del abdomen.



4. La cincha del hombro pasa por encima del hombro no lesionado y se conecta al bolsillo para la mano.
 · La cincha se ajusta para que ofrezca soporte y sea cómoda
 · La cincha no debe presionar el cuello

Cómo colocarlo usted mismo

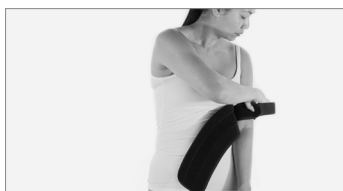

1. Sujete el cinturón entre su brazo lesionado y su cuerpo, luego fije la cincha del brazo superior al lateral del cinturón y ciérrela alrededor de su bíceps.



2. Envuelva el cinturón alrededor de su cintura, con el cierre orientado hacia su hombro lesionado.



3. Coloque su antebrazo dentro del bolsillo para la mano, a la altura de tu cintura.



4. Pase la cincha de hombro por encima de su hombro no lesionado y conéctela a la cincha de la mano.

Consejos útiles

- Ajuste las cinchas solo lo suficiente para sentirse con un buen soporte, pero sin que estén apretadas o incómodas.
- Si necesita acortar mucho la cincha del hombro, hágalo por la parte trasera, para que la parte delantera siga siendo fácil de ajustar más adelante.

USO PREVISTO / INDICACIONES

El inmovilizador de hombro DonJoy PSI Plus está diseñado para sujetar e inmovilizar el hombro después de una lesión o cirugía.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Recomendamos que la primera colocación se realice bajo la supervisión de un profesional de la salud.
- Si experimenta dolor, hinchazón, cambios en la sensibilidad o cualquier reacción inusual mientras usa este producto, consulte de inmediato a un profesional de la salud.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Lavar a mano (máx. 30 °C) con detergente suave.


DESTINADO A USO MÚLTIPLE POR UN SOLO PACIENTE

NO CONTIENE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL

AVISO: Aunque se han utilizado técnicas de última generación para lograr la máxima compatibilidad en cuanto a funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad, no se garantiza que el uso de este producto prevenga lesiones.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA DE CINTURA	TALLA
82-7440	< 115 cm	Standard
82-7441	115 – 160 cm	Large

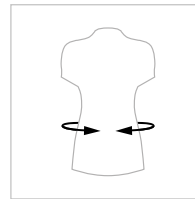

enovisTM

*Creating Better Together*TM

enovis.es

Los resultados individuales pueden variar. Ni Enovis, DJO, LLC ni ninguna de sus subsidiarias ofrecen asesoramiento médico. El contenido de este documento no constituye asesoramiento médico, legal ni de ningún otro tipo profesional. Para obtener información sobre tratamientos que puedan ser adecuados para usted, consulte a su profesional de la salud.